

Brûlures et ébouillements.

Le feu, les objets brûlants, les gaz brûlants, le courant électrique, les produits chimiques et les rayons solaires peuvent brûler la peau et les tissus sous-jacents. On parle de lésions dues aux brûlures lors de dommages par la vapeur et les liquides bouillants. On juge les brûlures et les lésions dues aux brûlures selon les critères suivants:

- 1^{er} degré** Rougeur de la peau.
- 2^e degré** Rougeur et formation de cloques, éventuellement tuméfaction superficielle.
- 3^e degré** Profonde destruction de la peau et des tissus sous-jacents avec tuméfaction ou carbonisation.

Premières mesures en cas de brûlures

- Arrêter immédiatement la pénétration de la chaleur.
- Refroidir immédiatement les endroits lésés avec de l'eau ou mieux avec de l'hydrogel **VESTA**, pendant au moins 20 et 30 minutes, pour empêcher l'influence de la chaleur, les enflures, la déshydratation et pour calmer la douleur.
- Important:** Parfois quelques secondes seulement peuvent décider de la profondeur de la brûlure.
- Recouvrir la lésion d'un pansement stérile ou de tissus propres.

Règles particulières:

- Ne pas enlever les vêtements
- Ne pas percer les cloques
- Ne pas utiliser de produits ménagers, tels que huile, crèmes, beurre, etc...



Important

Les brûlures des 2^e et 3^e degrés ainsi que de légères brûlures au visage, aux mains, sur les articulations ou sur les organes génitaux doivent être examinées et soignées par le médecin.

Attention

Les brûlures même minimales chez les enfants, contrairement aux adultes, peuvent être dangereuses.

Les premiers soins.



VESTA est un produit naturel contenant de l'eau et une substance gélifiante. Selon la dimension de la blessure, on appliquera **VESTA** de manière différente: en hydrogel pur ou en pansement imbibé d'hydrogel.

VESTA possède l'étonnante faculté d'absorber très efficacement la sensation de chaleur et soulage ainsi la douleur.

VESTA refroidit instantanément la région cutanée touchée et maintient durablement son effet. De ce fait, lors d'une application immédiate, il interrompt l'évolution en profondeur de la brûlure et minimise l'étendue de la lésion et des dommages. D'une part, l'hydrogel protège des impuretés extérieures et ainsi des surinfections, d'autre part, il empêche la déshydratation des tissus.

VESTA n'est ni irritant, ni gras et n'adhère pas à la plaie. Le médecin peut donc traiter la lésion sans désinfection douloureuse.

Utilisation:

VESTA est facile à utiliser. En cas de brûlure, il suffit de recouvrir la partie brûlée d'un pansement **VESTA** ou d'appliquer directement une couche épaisse d'hydrogel pur sur l'endroit lésé.



D'autres informations: www.vestatec.ch

Premiers soins
lors de brûlures.



INGRAFIK | M. INFANGER | STANSSTAD



Les produits VESTA

VESTAGEL: Un hydrogel stérile disponible en sticks pratiques et spécialement résistants.



VESTASAN: En pansements stériles imbibés d'hydrogel. Ce matériel de base est en viscosité douce, non tissé et libre de fibres.




VESTASAN est disponible en plusieurs grandeurs et est le produit idéal pour l'armoire à pharmacie.

VESTASOL: Un hydrogel en tubes pratiques contenant en plus une composition appropriée aux soins de la peau. VESTASOL agit agréablement et soulage lors de coups de soleil.



VESTASOL refroidit et apaise aussi efficacement les piqûres d'insectes et de méduses.

Votre distributeur VESTA:

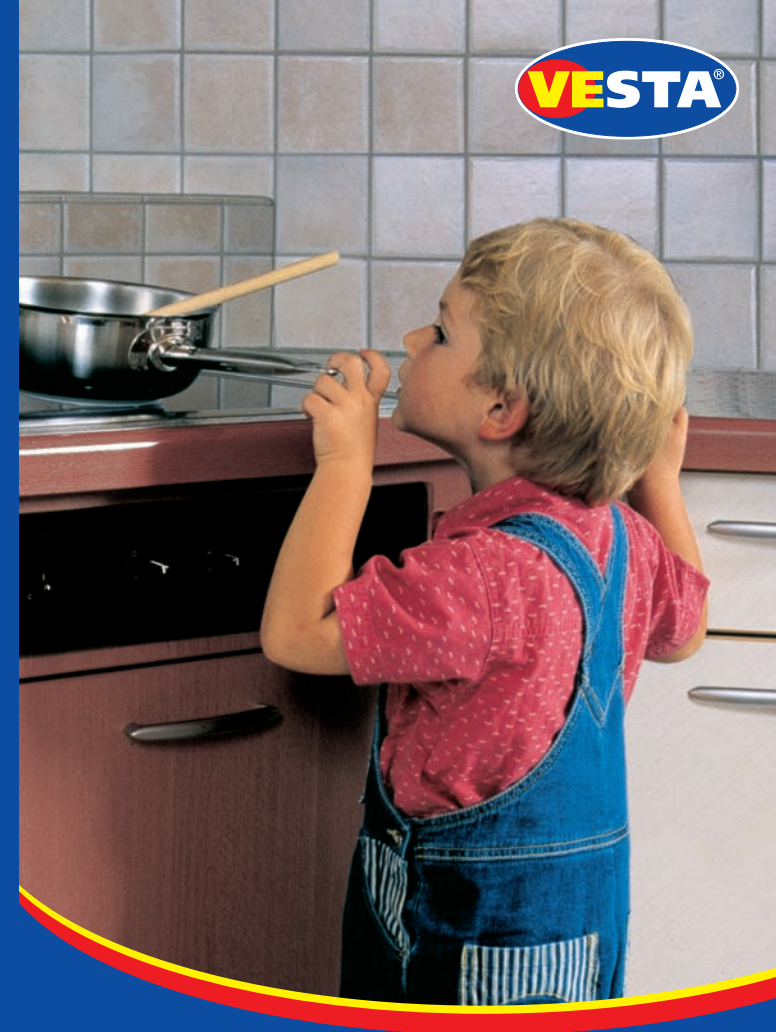

Brûlures
on peut se brûler
toujours et partout.